



VENTYO® Advantage. Lystgassblander – ved smertelindring.



Produktbeskrivelse

VENTYO Advantage er en pneumatisk drevet lystgassblander laget for medisinsk lystgass og medisinsk oksygen for smertestillende formål. Gassenes blandingsforhold kan varieres for å ivareta pasientens behov.

Pasientens innånding trigger flow av gass fra VENTYO Advantage. Uten denne triggingen opphører doseringen fra VENTYO Advantage automatisk.

VENTYO Advantage har en automatisk avstengingsmekanisme for lystgass som aktiveres om det skulle bli feil på oksygentilførselen. Dette for å hindre hypoxiske blandinger.

VENTYO Advantage har en innebygget alarmfunksjon som alarmerer både visuelt og med lyd om lystgass- eller oksygentrykket blir for lavt.

Sikkerhetsfunksjoner

VENTYO Advantage lystgassblanders sikkerhetsfunksjoner omfatter:

- Direkte innstilling av lystgass-/oksygenkonsentrasjon
- Integrrert inhalasjonsstyrt ventilmekanisme (On-Demand-ventil)
- Automatisk avstengingsmekanisme
- Indikatorer for lystgass- og oksygentilførsel
- Både visuelle alarm og lydalarm for lystgass og oksygen.

Spesifikasjon	Maxflow, garantert laveste nivå	120 l/min
	Utåndningsmotstand	0 til 6 cm H ₂ O ved 60 l/min
	Innåndningsmotstand	0 til -6 cm H ₂ O ved 60 l/min
	Øksygenkonsentrasjon (±5 % V/V ved minste flow 20 l/min)	30, 40, 50, 60, 70, 75, 90, 100 %
	Inngangstrykk	3,5 til 4,8 bar
	Alarm ved lavt inngangstrykk	2,7 ±0,07 bar
	Enhets avstengingstrykk	2,4 ±0,14 bar
	Utløsingstrykk for demandventil	-1,5 til -2,5 cm H ₂ O
	Flushflow oksygen	30 ±5 l/min
	Driftstemperatur	+5 °C til +40 °C
	Oppbevaringstemperatur	-40 °C til +60 °C
	Pasienttilkobling	15/22 mm
	Pasientkrets	2 delt krets med enveisventiler
	Pasientventil dødvolum	8 ml
Vekt	2,0 kg	
Mål B x D x H	236 x 194 x 112 mm	

Varenummer VENTYO Advantage Lystgassblander

	Varenummer	Beskrivelse
	336238	VENTYO Advantage N ₂ O/O ₂ gassblander inklusive tilbehør
Tilbehør	336223	VENTYO Advantage, Monteringsplate
	336471	VENTYO Advantage, Universalklave
	336267	VENTYO Advantage, O ₂ vinkelkobling
	336270	VENTYO Advantage, N ₂ O vinkelkobling
	336324	VENTYO Advantage, Patientkrets, engangs (10 st/kartong)

Kundesenter For bestilling eller mer informasjon om våre produkter, vennligst kontakt vårt kundesenter:
 Telefon 815 59 095
 hc.no@linde.com

For mer informasjon, besøk oss på www.linde-healthcare.no